


WAKEUP
status FACTORY



 Wakeup Status Factory  Wakeup Status Factory  Wakeup_Inside

www.wakeupsf.com


IONOKURE
Veicolatore transdermico



IONOKURE[®]

L'apparecchio **IONOKURE** è il nuovo sistema di veicolazione transdermica che, unito ai principi dell'elettrostimolazione, potenzia la penetrazione del prodotto nei tessuti ristabilendo l'equilibrio fisiologico.

Questa nuova tecnologia effettua una ionizzazione del prodotto che aiuta ad aprire i legami cheratinici e le membrane cellulari. Grazie alla *micronizzazione* del principio attivo, l'assorbimento da parte del corpo (che ha un mix di carica positiva e negativa) è notevolmente potenziata e garantisce risultati veloci ed efficaci. Il caricamento delle molecole (ionizzazione) assicura una penetrazione veloce e profonda come mai prima d'ora. Il trattamento è consigliato per contrastare l'insorgenza di forfora, sebo e soprattutto caduta dei capelli, oltre naturalmente alle rughe e alla perdita di elasticità dei tessuti, in sinergia con le lozioni **WAKEUP**.

IL MANIPOLO DELL'APPARECCHIATURA **IONOKURE** È IN ALLUMINIO ED EMETTE DUE DIFFERENTI TIPI DI LUCE:

ROSSO: stimolante, aumenta la pressione arteriosa e la frequenza cardiaca, sollecita la muscolatura e favorisce la disintossicazione.

BLU: purificante, abbassa la pressione e svolge un ruolo antisettico ed antinfiammatorio.

IL TRATTAMENTO È SUDDIVISO IN UNA DOPPIA FASE:

A. nebulizzazione del prodotto micronizzato e ionizzato;

B. elettrostimolazione della zona trattata che aiuta ad assorbire meglio il principio attivo.

LA DURATA DEL TRATTAMENTO È DI CIRCA 15/20 MINUTI



Il trattamento **Ionokure non può essere utilizzato** in caso di qualsiasi forma di dermatite o psoriasi (in tali casi si potrà solo veicolare il prodotto senza utilizzare la fase 2 del trattamento).

PROTOCOLLO:

Viso

- 1) Detersione latte/tonico
- 2) **Peeling cell** (applicato manualmente o con l'apparecchio **Oxykure**) ed elettrostimolazione con **Ionokure**
- 3) **Tonico Wakeup** riequilibrante pH
- 4) Nebulizzazione lozione specifica* (ossigenante o collagene) diluita secondo lo schema ed elettrostimolazione con **Ionokure** per 3 volte
- 5) **Wakeup Filler**
- 6) Disinfezione elettrodi e pulizia manipolo con ione solution

Cute

- 1) **Peeling cell** (applicato manualmente o con l'apparecchio **Oxykure**) ed elettrostimolazione con **Ionokure**
- 2) Risciacquo
- 3) Shampoo specifico (**Forfora, Sebo, Caduta**)
- 4) Nebulizzazione lozione specifica (**Forfora, Sebo, Caduta**) diluita secondo lo schema ed elettrostimolazione con **Ionokure** per 3 volte
- 5) Asciugatura
- 6) Disinfezione elettrodi e pulizia manipolo con ione solution

* Le lozioni dovranno essere diluite nel seguente modo prima di essere veicolate con il manipolo **Ionokure** con la pipetta in dotazione nelle lozioni da 35 ml

- **Lozione Ossigenante 1 pipetta piena di lozione + 5,5 pipette di ione solution**
- **Lozione Collagene 1 pipetta piena di lozione + 3 pipette di ione solution**

Il prodotto da nebulizzare va preparato nelle ampolline in vetro. Se dovesse avanzare del prodotto lo si può conservare nell'ampollina che sarà chiusa con i tappi in dotazione

Dopo aver effettuato la miscela, inserire l'ampolla all'interno del manipolo, accendere **Ionokure** e premere la funzione **NANO**, per iniziare la nebulizzazione del prodotto. Una volta saturata la zona da trattare, spegnere la funzione **NANO** e azionare la funzione **INTENSITY**, regolandola in base alla percezione del cliente (che dovrà avvertire un leggero formicolio). **NB** per pulire l'ugello del manipolo utilizzare un cotton fioc. È di vitale importanza pulire il manipolo dopo ogni trattamento al fine di evitare che l'ugello si intasi.